

RENGÖRING
DIGITALA THERAPIDJUR



Rengöring

AV DIGITALA TERAPIDJUR

Vi rekommenderar att tvätta och göra det rent för hand så här:

- Spraya pälsen med ett giftfritt och biologiskt rengöringsmedel, torka av med ren trasa/torkduk
- Upprepa vid behov.
- Torka pälsen med en torr trasa, låt djuret sedan fortsätta att självtorka.
- Borsta djurets päls med en borste. Naturborst funkar bäst!
- Torka sedan av djuret med en engångsservett för bakteriedödande material, ex "Tork Våtdukar för Ytdesinfektion" dödar 99,99 % av bakterierna.

Blötlägg aldrig ett digitalt terapidjur, det kan skada elektroniken!

För att undvika smittspridning:

Vi rekommenderar i första hand att ha personliga digitala terapidjur. Om det digitala terapidjuret inte är personligt bör personen och personalen sprita sina händer före och efter användning.

Torka av djuren med en engångsservett med bakteriedödande medel innan nästa person använder djuret.



våtdukar

99:-

Tork våtdukar för ytdeinfektion är effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer, inklusive virus och bakterier. 60-pack



Sprayflaska

119 :-

Sprayflaskan är tillverkad av återvinningsbar PET-plast. Levereras med NORDEX Dailyclean koncentrat som späds med vatten. 500 ml



Rengöringsdukar

199 :-

Tålig rengöringsduk som absorberar smutsen och som används för torka av djuren ihop med rengöringsmedlet. 40 pack



Rengöringsmedel

99:-

NORDEX Dailyclean - Cradle to Cradle certifierad och Svanen märkt. Biologiskt nedbrytbar med förnyelsebara råvaror. Koncentrad - 1 liter



Borste

99:-

Borste i miljövänlig bambu och borst i äkta svinborst. Borsta upp djurets päls efter rengöring



Paket rengöring

499:-

Allt ni behöver för rengöring av digitala terapidjur. Tork våtdukar, sprayflaska med rengöringsmedel, rengöringsdukar samt borste.

Alla priser exkl moms. Paket rengöring läggs i befintlig fraktkartong med katt/hund om beställning sker samtidigt för miljövänligare transport och lägst fraktkostnad.

Verifierad rengöring

En vanlig fråga vi får är hur djuren rengörs för att förhindra smitta?

För att verifiera rengöringsinstruktionen har vi använt tryckplattor för mäta bakterieförekomst, en beprövad metod.

Rengöringen gör djuren rena och säkra att använda bland flera personer ur ett smittskyddsperspektiv!



Hur testet gjordes

Djuret smutsades ner innan testet och därefter gjordes ett första test med en tryckplatta. Därefter rengjordes djuret enligt instruktion. När djuret var rengjort togs ett andra test med ny ren tryckplatta.

Efter föreskriven tid hade mycket bakterier växt till sig på tryckplattan ifrån det smutsiga djuret men däremot den andra tryckplattan som använts efter rengöringen så fanns det inga bakterier alls som vuxit på tryckplattan.

Se film på vår hemsida på testet och länkar till där ni köper tryckplattor och ATP mätare.

Kontakt

info@werawelltech.se
+ 46 73 587 52 35
Hemsida: werawelltech.se

Mariana Wiström - mariana@werawelltech.se
Fredrik Westergaard - fredrik@werawelltech.se

werawelltech.se

