

A close-up photograph of a person's hand holding a green and black comb over the head of a tabby cat. The cat is lying down on a carpeted floor, looking towards the camera with a calm expression. The background is softly blurred, showing more of the cat's body and the carpet.

Digitala terapi och sällskapsdjur

Rengöringsinstruktion



Wera Welltech



Rengöring

AV DIGITALA TERAPIDJUR

Vi rekommenderar att tvätta och göra det rent för hand så här med vårt rengöringskit:

- Fyll på sprayflaskan med vatten första gången, den levereras med koncentrat. Detta för minimera fraktkostnad och miljöpåverkan
- Spraya sen pälsen med rengöringsmedlet, torka av med de blå trasorna
- Upprepa vid behov.
- Torka pälsen med en blå torr trasa, låt djuret sedan fortsätta att självtorka.
- Borsta djurets päls med borsten, vår borste med naturborst funkar bäst.
- Torka sedan av djuret med en engångsservett för bakteriedödande material, "Tork Våtdukar för Ytdeinfektion". Denna dödar 99,99 % av bakterierna.

Blötlägg aldrig ett digitalt therapidjur, det kan skada elektroniken!

För att undvika smittspridning:

Vi rekommenderar i första hand att ha personliga digitala therapidjur.

Om det digitala therapidjuret inte är personligt bör personen och personalen sprita sina händer före och efter användning.

Torka av djuren med Tork engångsservett med bakteriedödande medel innan nästa person använder djuret.



Wera Welltech



Tork - våtdukar

119:-

Tork våtdukar för ytdeinfektion är effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer, inklusive virus och bakterier. 60-pack



Sprayflaska

119:-

Sprayflaskan är tillverkad av återvinningsbar PET-plast. Levereras med NORDEX DailyClean koncentrat som späds med vatten. 500 ml



Rengöringsdukar

199:-

Tålig rengöringsduk som absorberar smutsen och som används för torka av djuren ihop med rengöringsmedlet. 40 pack



Rengöringsmedel

119:-

NORDEX DailyClean - Cradle certifierad och Svanen märkt. Biologiskt nedbrytbar med förnyelsebara råvaror. Koncentrad - 1 liter



Borste

119:-

Borste i miljövänlig bambu och borst i äkta svinborst. Borsta upp djurets päls efter rengöring



Paket rengöring

589:-

ord pris 675 kr

Allt ni behöver för rengöring av digitala therapidjur! Tork våtdukar, sprayflaska med rengöringsmedel, rengöringsdukar samt borste.

Flaskan fylls upp med vatten så koncentratet blir brukslösning. Mindre miljöpåverkan!

Alla priser exkl. moms. Paket rengöring läggs om möjligt i befintlig fraktkartong med katt/hund om beställning sker samtidigt för miljövänligare transport och lägst fraktkostnad.



Wera Welltech

Verifierad rengöring

En vanlig fråga vi får är hur djuren rengörs för att förhindra smitta?

För att verifiera rengöringsinstruktionen har vi använt tryckplattor för mäta bakterieförekomst, en beprövad metod.

Rengöringen gör djuren rena och säkra att använda bland flera personer ur ett smittskyddsperspektiv!



Hur testet gjordes

Djuret smutsades ner innan testet och därefter gjordes ett första test med en tryckplatta.

Därefter rengjordes djuret enligt instruktion. När djuret var rengjort togs ett andra test med ny ren tryckplatta.

Efter föreskriven tid hade mycket bakterier växt till sig på tryckplattan ifrån det smutsiga djuret men efter rengöringen inga bakterier alls som vuxit på tryckplattan.

Se film på vår hemsida på testet!



info@werawelltech.se
+ 46 73 587 52 35

werawelltech.se



Wera Welltech